




 157305, Костромская область,
Мантуровский район, г. Мантурово,
ул. Гидролизная д. 32

 8 (49446) 287-06, 8 (920) 394-68-76

 ingakamf2@mail.ru

 р/с 40702810829140105368 Костромское
Отделение № 8640 ПАО Сбербанк г. Кострома
к/с 30101810200000000623
ИНН 4404003565 КПП 440401001
ОКПО 94289001 ОГРН 1064434007912
Дата регистрации 24.07.2006 г.

**ПАКЕТ ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
С ОДНОЙ ПОДУШЕЧКОЙ СТЕРИЛЬНЫЙ по ГОСТ 1179 , Россия, ООО "Ингакамф"
РУ № ФСР 2008/03791 от 20 ноября 2019 года.
Сертификат о происхождении товара форма СТ-1 № 204000001**

Артикул: ППМПП-1 НДС: 10%

Назначение. Пакет первой помощи с одной подушечкой применяется для перевязки ран, ожогов и остановки некоторых видов кровотечения. Пакет представляет из себя заключенную в оболочку из полимерной пленки стерильный набор перевязочного материала, который предназначен для оказания первой медицинской помощи, само- и взаимопомощи при ожогах и ранениях, для наложения повязки на раны.

Пакет первой помощи с одной подушечкой предназначен для оказания первой медицинской само- и взаимопомощи при несчастных случаях, стихийных бедствиях и других экстремальных ситуациях.

Состав пакета первой помощи с одной подушечкой:

- повязка (ватно-марлевая неподвижная подушечка или подушечка из полотна нетканого холстопрощивного гигроскопического медицинского, марлевый бинт)
- индивидуальная упаковка (наружная оболочка)

Подушечка пакета первой помощи имеет три слоя:

1. Атравматический, обеспечивающий минимальную адгезию к ране на основе трикотажной сетки.
2. Сорбционный на основе отбеленных хлопко-вискозных волокон.
3. Защитный на основе трикотажной сетки.

Стерилизация осуществляется радиационным методом по ГОСТ ISO 11137-2.

Пакет предназначен для однократного применения

Преимущества:

- Не травмируют при снятии подлежащие ткани
- Не вызывают болевого синдрома у пациентов
- Предотвращают инфицирование раны извне
- Не вызывают аллергических и местно-раздражающих эффектов
- Не имеют противопоказаний к применению
- Рекомендуются использовать в аптечках первой медицинской помощи

Порядок использования. Для использования пакета первой помощи с одной подушечкой необходимо соблюсти данную последовательность:

- Разорвать оболочку перевернув пакет
- левой рукой взять за конец бинта и, придерживая правой рукой, развернуть до скатки бинта
- Правой рукой взять за скатку бинта и развернуть повязку
- Не прикасаясь накладываемой поверхностью подушечки к рукам и посторонним предметам, наложить ее на рану или ожог стороной, противоположной пришиванию бинта
- Прибинтовать подушечку.

Технические характеристики

Длина бинта 5м±0,3, ширина 10 см±0,5 плотность 36 г/м2.

Подушечка: длина 13,0 см ± 1,5, ширина 11,0 см ± 1,0.

Срок годности изделия - 5 лет от даты стерилизации.


Транспортная упаковка – коробка из гофрокартона.


Транспортирование и хранение

Хранить в сухом, проветриваемом помещении, в соответствии с правилами пожарной безопасности в условиях, предотвращающих загрязнение, механические повреждения и действие солнечных лучей.

Утилизация

Использованные Пакеты утилизируют в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

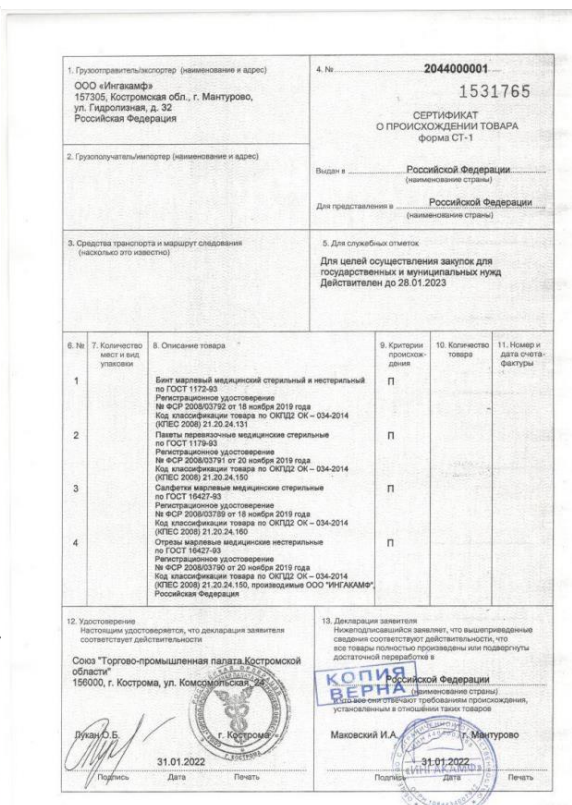

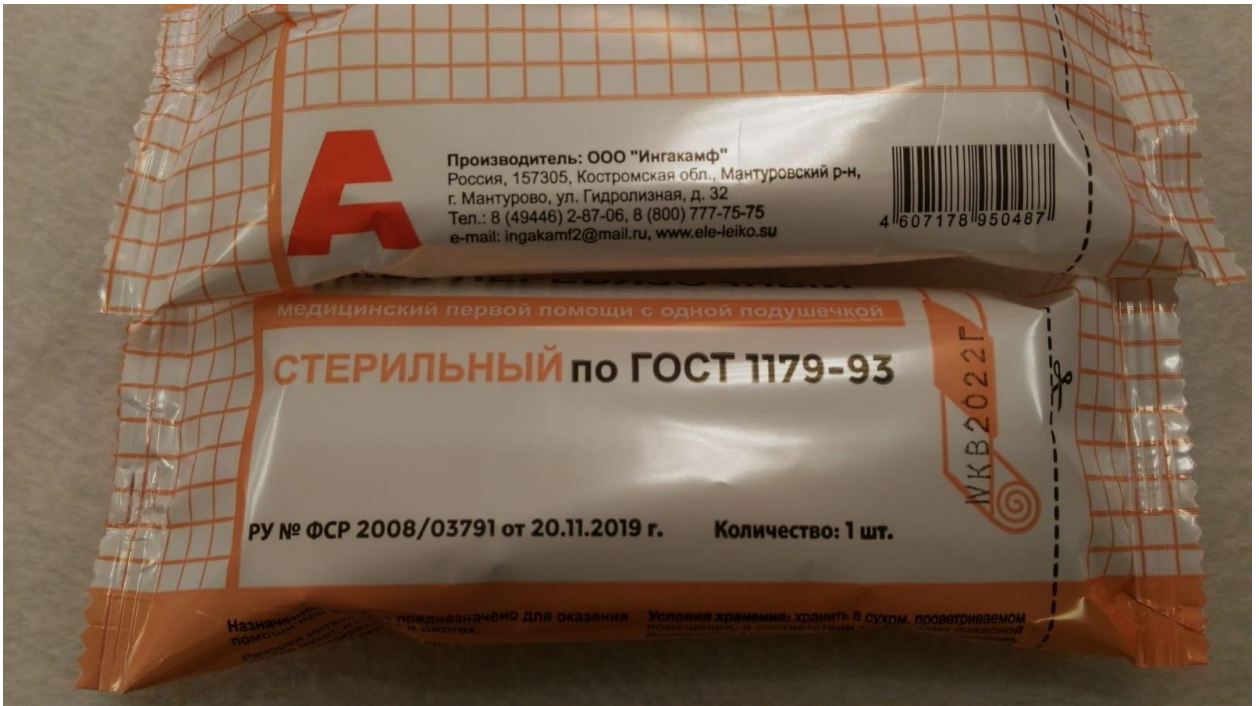



Изображения внешнего вида упаковки
Пакета перевязочного первой помощи с одной подушечкой.