



**Салфетки спиртовые антисептические, стерильные  
из нетканого материала по ТУ 21.20.24-001-94289001-2018, Россия, ООО "Ингакамф"  
РУ № РЗН 2020/9832 от 27 марта 2020 года.**

**Сертификат о происхождении товара форма СТ-1 № 2044000003**

Артикулы: ССИ60/60, ССИ60/100; ССИ125/110; ССИ 135/185; ССИ200/250 НДС: 10%

**Назначение.** Для санации кожи до и после инъекций, дезинфекционной обработки поверхности рук, обработки кожных покровов пациентов, медицинской техники и рабочих поверхностей.

Противопоказания к применению.

- индивидуальная непереносимость спиртосодержащего раствора
- не обрабатывать салфетками слизистые оболочки

Представляют собой основу из нетканого материала, пропитанную раствором 70% этилового спирта и индивидуально упакованную в пакеты из трехслойного комбинированного материала.

Салфетки предназначены для использования сотрудниками медицинских учреждений (врачи, средний и младший медицинский персонал), а также для домашнего применения лицами, не имеющими специального образования.

**Салфетки выпускаются в стерильном виде, в следующих вариантах исполнения: 6 см x 6 см; 6 см x 10 см, 11 см x 12,5 см, 13,5 см x 18,5 см.**

Стерилизация осуществляется радиационным методом по ГОСТ ISO11137-2.

Салфетки предназначены для однократного применения.

### Технические характеристики

Размеры: 6 (±0.5) см x 6 (±0.5) см; 6 (±0.5) см x 10 (±1) см, 11 (±1) см x 12,5 (±1) см, 13,5 (±1) см x 18,5 (±1) см

### Состав изделия:

- Нетканый материал Спанлейс (состав: вискоза 50%, полиэфир 50%, плотность – 40 г/м<sup>2</sup>)
- Этиловый спирт, раствор для наружного применения, 70%.
- Индивидуальная герметичная упаковка с маркировкой.

Вариант исполнения изделия	Масса пропиточного состава в салфетке, г, не менее
6 см x 6 см	0,4
6 см x 10 см	0,6
11 см x 12,5 см	0,9
13,5 см x 18,5 см	1,6

Срок годности - 5 лет от даты стерилизации.  
Групповая упаковка – полиэтиленовый пакет.

Транспортная упаковка – короб из гофрированного картона.

Салфетки должны иметь ровно обрезанные края.  
Деформация и перекосы салфеток не допускаются  
Салфетки не должны выделять ворс и оставлять на коже волокнистые компоненты  
Салфетки должны быть равномерно пропитаны раствором антисептического препарата  
Салфетка должна быть стерильной  
Индивидуальная упаковка должна быть герметичной.

**Порядок использования:**

Обработка инъекционного поля: тщательно протереть салфеткой, выдержать время до полного высыхания

Обработка локтевого сгиба: тщательно протереть кожу двукратно, используя отдельные салфетки, время выдержки – до полного высыхания.

Обработка поверхностей: вручную вскрыть пакет, достать и развернуть салфетку, тщательно протереть поверхность изделия. Поверхности должны быть увлажнены полностью. В зависимости от конфигурации и размера площади поверхности для обработки используются одна или несколько салфеток. Одной салфеткой пользуются до тех пор, пока она увлажняет обрабатываемую поверхность. При обработке необходимо учитывать рекомендации производителя обрабатываемого медицинского изделия, отраженные в эксплуатационной документации.

**Транспортирование и хранение**

Условия транспортирования по условиям хранения 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150. Салфетки должны храниться в сухих проветриваемых складских помещениях по условиям хранения 1 (Л) ГОСТ 15150, но при температуре от 0°С до +30 °С. Салфетки должны храниться на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.

**Утилизация**

Использованную салфетку относят к отходам класса Б и утилизируют в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

**Сертификация**

Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/9832 от 27.03.2020 года.  
Сертификат о происхождении товара форма СТ-1 № 2044000003 от 15.07.2023, действителен до 14.07.2023 года



Изображение внешнего вида Салфетки антисептической, размер 6 см x 10 см.



Изображение внешнего вида Салфетки антисептической, размер 11 см x 12,5 см.



Изображение внешнего вида Салфетки антисептической, размер 13,5 см x 18,5 см.

# САЛФЕТКА СПИРТОВАЯ

**антисептическая,  
стерильная  
из нетканого  
материала.**

Состав: основа из нетканого материала,

**спирт этиловый 70%**

Производитель: ООО «ИНГАКАМФ»

Адрес производителя и место  
производства:

Россия, 157305, Костромская обл.,  
Мантуровский р-н, г. Мантурово,  
ул. Гидролизная, д. 32.  
Тел. 8-49446-287-06.

6 см x 10 см

1 шт.

ТУ 21.20.24-001-94289001-2018

**НЕТОКСИЧНО**

РУ № РЗН 2020/9832 от 27.03.2020 г.

Партия и дата стерилизации: **СТЕРИЛЬНО**  
указана на шве.

**Срок годности:** 5 лет с даты стерилизации.

Не использовать по окончании срока годности.

**Условия хранения:** хранить в сухом месте при  
температуре от 0 до 30°C. Предназначены для  
санации кожи до и после инъекций, дезинфек-  
ционной обработки рук, обработки кожных  
покровов, медицинской техники и рабочих  
поверхностей.

**Инструкция по применению:** вскрыть упаковку,  
развернуть салфетку, протереть поверхность,  
дать высохнуть (30 сек.).

**Утилизация:** использованную салфетку относят  
к отходам класса Б и утилизируют в соответствии  
с СанПиН 2.1.7.2790-10.



021032 10.22

# САЛФЕТКА СПИРТОВАЯ

**антисептическая,  
стерильная  
из нетканого  
материала.**

Состав: основа из нетканого материала,

**спирт этиловый 70%**

Производитель: ООО «ИНГАКАМФ»

Адрес производителя и место  
производства:

Россия, 157305, Костромская обл.,  
Мантуровский р-н, г. Мантурово,  
ул. Гидролизная, д. 32.  
Тел. 8-49446-287-06.

11 см x 12,5 см

1 шт.

ТУ 21.20.24-001-94289001-2018

**НЕТОКСИЧНО**

РУ № РЗН 2020/9832 от 27.03.2020 г.

Партия и дата стерилизации: **СТЕРИЛЬНО**  
указана на шве.

**Срок годности:** 5 лет с даты стерилизации.

Не использовать по окончании срока годности.

**Условия хранения:** хранить в сухом месте при  
температуре от 0 до 30°C. Предназначены для  
санации кожи до и после инъекций, дезинфек-  
ционной обработки рук, обработки кожных  
покровов, медицинской техники и рабочих  
поверхностей.

**Инструкция по применению:** вскрыть упаковку,  
развернуть салфетку, протереть поверхность,  
дать высохнуть (30 сек.).

**Утилизация:** использованную салфетку относят  
к отходам класса Б и утилизируют в соответствии  
с СанПиН 2.1.7.2790-10.



011122 11.22

# САЛФЕТКА СПИРТОВАЯ

**антисептическая,  
стерильная  
из нетканого  
материала.**

**Состав:**  
основа из нетканого материала,

**спирт этиловый 70%**

**Производитель:**  
ООО «ИНГАКАМФ»  
**Адрес производителя и место  
производства:**  
Россия, 157305,  
Костромская обл.,  
Мантуровский р-н,  
г. Мантурово,  
ул. Гидролизная, д. 32.  
Тел. 8-49446-287-06.

13,5см x 18,5см 1 шт.

ТУ 21.20.24-001-94289001-2018

**НЕТОКСИЧНО**

РУ № РЗН 2020/9832 от 27.03.2020 г.

**Партия и дата стерилизации:** **СТЕРИЛЬНО**  
указана на шве.

**Срок годности:** 5 лет с даты стерилизации.

Не использовать по окончании срока  
годности. **Условия хранения:** хранить в  
сухом месте при температуре от 0 до 30°C.

Предназначены для санации кожи до и после  
инъекций, дезинфекционной обработки рук,  
обработки кожных покровов, медицинской  
техники и рабочих поверхностей.

**Инструкция по применению:** вскрыть  
упаковку, развернуть салфетку, протереть  
поверхность, дать высохнуть (30 сек.).

**Утилизация:** использованную салфетку  
относят к отходам класса Б и утилизируют в  
соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10.

011122 11.22



Маркировка Салфеток антисептических.